

CORONA TECHNIK CHECKLISTE

Technische Sicherung Ihrer Praxis / Ihrem Labor bei Teilbetrieb oder Schließung

Behandlungszimmer:

- Wir empfehlen, eine Wartung nach Herstellervorgaben durchzuführen.
- Filter der Saugschläuche reinigen oder ersetzen.
- Chemische Absaugreinigung durchführen.
- Sammelbehälter des Amalgamabscheiders wechseln.
- Alle Saugschläuche und Instrumente von der Einheit entfernen und aufbereiten.
- Motoren und Kupplungen entfernen.
- Alle O-Ringe an den Saugschläuchen und Instrumentenschläuchen reinigen und pflegen.
- Alle wasserführenden Bereiche der Einheit von den Servicetechnikern*innen mit entsprechenden Mitteln auffüllen lassen, um das Biofilmwachstum zu verhindern.
- Eckventile am Wasserzulauf der Einheit durch die Servicetechnikern*innen mit verlängerten Schläuchen für die regelmäßige Spülung vorbereiten.
- Einheit vom Stromnetz trennen.
- Bei Wiederinbetriebnahme eine Wasserprobe durchführen.

Kleingeräte:

- Spülung des Prophylaxegerätes nach Herstellerangaben durchführen.
- Pulverkammern und Tanks am Prophylaxegerät leeren und reinigen.
- Akkugeräte aus der Ladestation nehmen und Akkus aus dem Gerät entfernen.

Aufbereitungsraum:

- Wir empfehlen, eine Wartung am Thermodesinfektor und Autoklaven nach Herstellervorgaben durchzuführen.
- Alle Wasserbehälter am Autoklaven leeren.
- Bei allen fest ans Wassernetz angeschlossenen Geräten die Zuleitungen für die regelmäßige Spülung vorbereiten.
- Ultraschallbad ablassen und reinigen.
- Geräte vom Stromnetz trennen.
- Ersatzpatronen für die Wasseraufbereitung vorsorglich bestellen.

Röntgen:

- Röntengeräte vom Stromnetz trennen oder Sicherung raus.
- Funksensoren aus der Ladestation nehmen.
- Flüssigkeiten am Entwickler ablassen, Behälter mit warmem Wasser auffüllen und einen Film durchlaufen lassen. Wasser ablassen und Rollenpaket trocken lagern.

Maschinenraum:

- An der Saugmaschine durch Servicetechniker*in ca. eine Minute Sprühöl direkt am Eingang ansaugen lassen.
- Sammelbehälter am zentralen Amalgamabscheider austauschen.
- Kompressor vom Stromnetz trennen.
- Saugmaschine für periodisches Anlaufen am Stromnetz lassen.

Labor, CAD/CAM:

- Laborgeräte mit Wasser spülen und reinigen.
- Gipsabscheider leeren.
- Vom Hersteller empfohlene Reinigungsmaßnahmen an der CAM-Maschine durchführen.
- Jegliche Flüssigkeitsbehälter leeren. Filter reinigen oder austauschen.
- Geräte vom Stromnetz trennen.

Praxisversorgung:

- Regelmäßige Datensicherung gewährleisten.
- Alle Arbeitsplatzrechner herunterfahren.
- Alle Zusatzgeräte wie Drucker, Scanner, Kartenleser, etc. ausschalten.
- Server, Telefonanlage, Fax und Alarmanlage nicht ausschalten.

Praxisschild und Homepage:

- Hinweise über geänderte Öffnungszeiten und Schutzmaßnahmen sowie Kontaktmöglichkeiten veröffentlichen bzw. aushängen.
- Brandelicious Flyer

Wir unterstützen Sie auch in diesen Zeiten weiterhin als zuverlässiger und kompetenter Partner.

Erhalten Sie schon unseren Newsletter mit aktuellen Informationen?

Melden Sie sich an:



Service Hotline: 0800 801090-7